



# DESINFECCIÓN

**DINPO**  
eco • safe cleaning



## DESINBAC CLINIC

DESINFECTANTE SUPERFICIES AMBITO SANITARIO- AEMPS: 1462-DES  
Normas: UNE-EN 13727/ UNE-EN 13624/ UNE-EN 16615/ UNE-EN 14476

Versión v1.7

07/03/2025

### Presentación

Garrafa 1 - 5 L

### Pictogramas



### Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) N° 648/2004 sobre detergentes.

La empresa no se hace responsable de unas condiciones de uso del producto fuera de las especificadas, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto

### FICHA TÉCNICA

#### Especificaciones del producto:

PH: 8.5-9.5 (100%)

Densidad: 0.95-1.00 g/cm<sup>3</sup>

Color: Incoloro

Aspecto: Líquido transparente.

#### Fórmula cualitativa:

tensioactivos catiónicos < 5% tensioactivos no iónicos < 5% Alcoholes alifáticos 5% - 15%

### MEMORIA DESCRIPTIVA

Este desinfectante está diseñado para la limpieza de superficies en el ámbito sanitario, aplicándose por pulverización con mopa o bayeta aséptica. Antes de su uso, es necesario realizar una limpieza en profundidad de las superficies. Cumple con las siguientes normas: UNE-EN 13727: Bactericida de superficie, UNE-EN 13624: Levuricida en superficie, UNE-EN 16615: Bactericida y levuricida en superficies no porosas, utilizando acción mecánica frente a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae y Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus brasiliensis y Candida albicans, UNE-EN 14476: Actividad viricida de espectro limitado a una temperatura de 20°C y 5 minutos de contacto, frente a Adenovirus y Norovirus murino. Aplicaciones: Desinfección de superficies lavables: mobiliario sanitario, encimeras, superficies exteriores de equipos, acero inoxidable, lámparas cialíticas, armarios, cubos de residuos, paredes y puertas, lavamanos y griferías, estructuras móviles, rejillas de aire acondicionado, sillones de intervención y auxiliares. Se recomienda su uso en instalaciones que requieren un alto nivel de protección contra patógenos, incluyendo bacterias, virus, hongos y parásitos. Además, es un producto de rápida aplicación y "ready-to-use", lo que lo hace cómodo y eficiente.

### MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Aplicar puro para superficies, y dejar en contacto el desinfectante y el sustrato a tratar el máximo tiempo posible (Tiempo de contacto mínimo aconsejable: 5 min a temperatura ambiente). Dejar secar. Se deberán aclarar con agua de consumo las superficies tratadas o expuestas que vayan a estar en contacto directo con las personas. No mezclar con tensioactivos aniónicos, agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes. Se requiere limpieza previa. No reutilizar el envase una vez vacío. Aplicar en ausencia de personas. Conservar únicamente en el recipiente original. Se deberá almacenar en lugar seco y fresco y alejado de la luz solar directa o fuentes de calor. También debe protegerse de temperaturas inferiores a 0°C. A fin de evitar riesgo para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medioambiente. Restringido a uso profesional. NO REENVASAR. COMPOSICIÓN: Alcohol isopropílico (10,3%), Cloruro de didecildimetilamonio (1,00%), excipientes (csp 100%).

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia: Atención

### FRASES H

H315 - Provoca irritación cutánea. H319 - Provoca irritación ocular grave.

### FRASES P

P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...  
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/...  
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.



[www.racrisa.com](http://www.racrisa.com)